


РУКОВОДСТВО ПО ОЧИСТКЕ ЭНДОСКОПА EVIS EXERA III и более ранние модели (за исключением TJF-Q180V)

ВНИМАНИЕ! Данное описание порядка работы представляет собой краткий обзор этапов, которые необходимо выполнить для надлежащей обработки эндоскопов EVIS EXERA III. Выполняйте этапы согласно подробным указаниям в последней версии РУКОВОДСТВА ПО ОБРАБОТКЕ ЭНДОСКОПОВ.

Предварительная очистка в процедурном кабинете

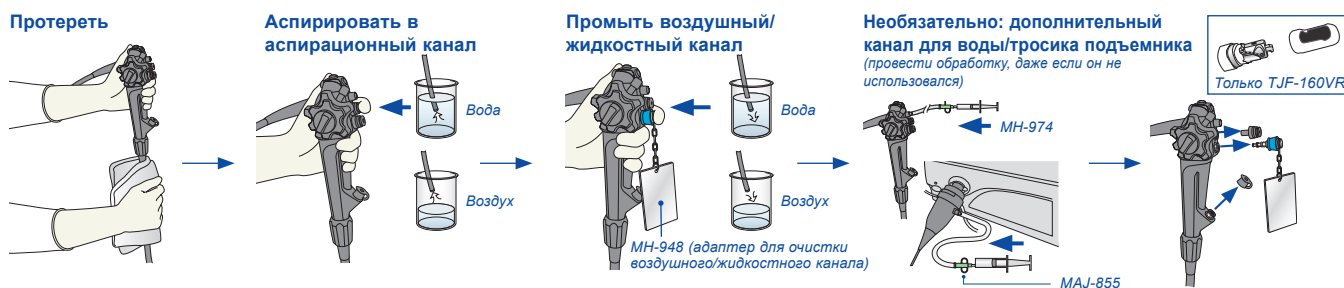


Проверка герметичности

Подсоединение течеискателя к эндоскопу EVIS EXERA II




Подсоединение течеискателя к эндоскопу EVIS EXERA III

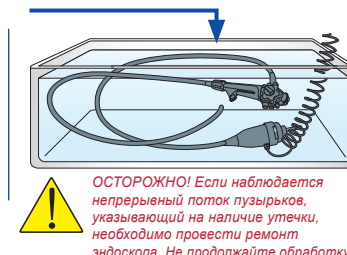


Ручная очистка


Погрузить и протереть

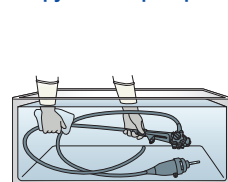


Очистить щеткой эндоскоп, погруженный в жидкость

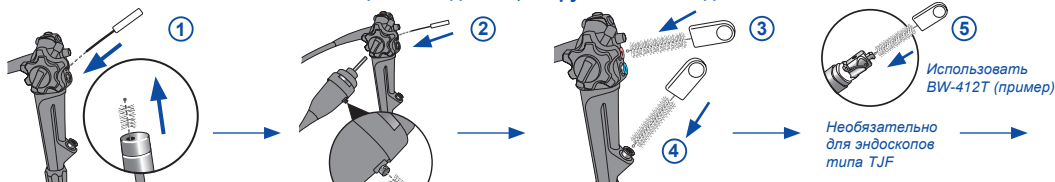


Промыть воздушный/жидкостный канал

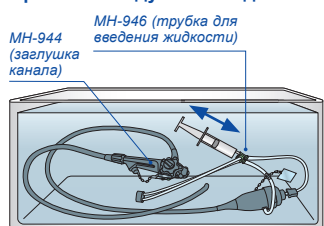

Необязательно: дополнительный канал для воды/тросика подъемника

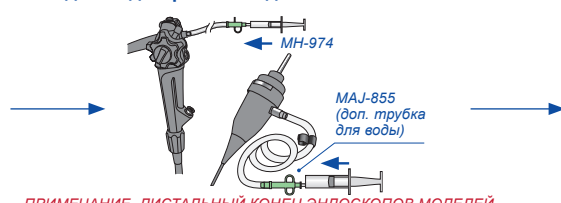


Протереть в погруженном состоянии

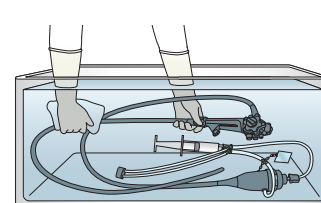


ПРИМЕЧАНИЕ: ДИСТАЛЬНЫЙ КОНЕЦ ЭНДОСКОПОВ МОДЕЛЕЙ TJF-160RVR ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОМЫВКЕ.

Промывка

Промыть все каналы водой

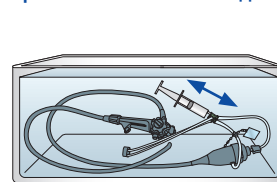

Продуть все каналы воздухом

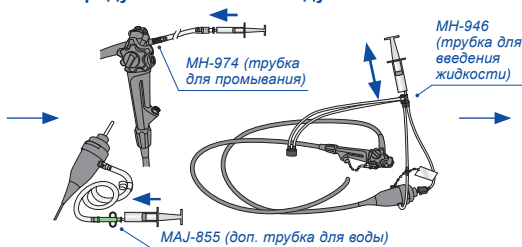

Протереть



Разместить эндоскоп в репроцессоре для обработки эндоскопов



Данная информация не заменяет руководство по эксплуатации. Необходимо всегда обращаться к содержащимся там инструкциям.